

Mode d'emploi



Cytobrush® Plus GT

Stérile

Cytobrush® Plus GT stérile ne peut être utilisé qu'une seule fois. Jeter après utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Doit être utilisé uniquement par le personnel médical.

MODE D'EMPLOI

Cytobrush® Plus GT stérile est utilisé pour faire des prélèvements endocervicaux aux fins :

1. d'études de frottis vaginaux (le prélèvement s'effectue généralement au moyen d'une spatule) ;
2. des diagnostics d'infection, par exemple : le chlamydia.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser Cytobrush® Plus GT sur une femme enceinte après la 10^e semaine de grossesse.

Ne pas utiliser Cytobrush® Plus GT pour les prélèvements d'endomètre.

ATTENTION

Ne jamais introduire Cytobrush® Plus GT trop profondément dans le canal cervical. Pendant toute la procédure, il faut que des poils de la brosse soient visibles dans la partie inférieure du cervix.

MISE EN GARDE

Un léger saignement peut survenir lors du prélèvement. Vérifier que ce saignement a cessé à la fin de l'examen gynécologique.

STÉRILITÉ

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Ne pas utiliser les produits dont les emballages sont ouverts ou endommagés.

Ne pas stériliser à nouveau.

INSTRUCTIONS POUR EFFECTUER LES PRÉLÈVEMENTS

1. Introduire délicatement Cytobrush® Plus GT dans le canal cervical. S'assurer que quelques poils de la brosse restent visibles à l'extérieur du col.
2. Tourner lentement la brosse d'un (1) tour.
3. Retirer Cytobrush® Plus GT.

PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON POUR LA CYTOLOGIE

- Faire rouler Cytobrush® Plus GT sur une lame en verre.
- Fixer immédiatement avec un vaporisateur de cytologie ou avec de l'éthanol à 95 %.

PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON POUR LA MICROBIOLOGIE, par exemple : le chlamydia

Prrière de consulter un laboratoire de microbiologie pour obtenir des instructions détaillées en ce qui concerne des examens particuliers.

Mode d'emploi



Cytobrush® Plus GT Scored Non stérile

Cytobrush® Plus GT Scored est à usage unique.
Son utilisation est réservée au personnel médical qualifié.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Cytobrush® Plus GT Scored est utilisé dans la collecte d'échantillons de cellules de l'endocol de l'utérus pour la cytologie **liquide** et la microbiologie. Le dispositif a un manche pré-entaillé et il ne doit **PAS** être utilisé pour les frottis cervicaux en raison du risque de rupture involontaire du manche.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser Cytobrush® Plus GT Scored chez la femme enceinte après la 10^{ème} semaine de grossesse.
Ne pas utiliser Cytobrush® Plus GT Scored pour les prélèvements de l'endomètre.

ATTENTION

Ne pas introduire Cytobrush® Plus GT Scored trop profondément dans l'endocol. Pendant toute la procédure, il faut que des poils de la brosse soient visibles dans la partie inférieure du col.

MISE EN GARDE

Un léger saignement peut survenir lors du prélèvement. Vérifier que ce saignement a cessé à la fin de l'examen gynécologique.

MODE D'EMPLOI

1. Introduire délicatement Cytobrush® Plus GT Scored dans l'endocol. S'assurer que quelques fibres de la brosse restent visibles à l'extérieur du col.
2. Tourner lentement la brosse d'un tour (1).
3. Retirer Cytobrush® Plus GT Scored.

PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

Consulter le laboratoire pour obtenir des instructions détaillées relatives à chaque test spécifique.